

NoGag - Droga do Twojego sukcesu

Rozwiązanie zapewniające udaną pracę bez odruchu wymiotnego



- Tłumi odruch wymiotny w ciągu 10 sekund, utrzymuje się przez 60 minut.
- Oferuje bezstresowe doświadczenie; więcej pacjentów, procedur i skierowań.
- Idealny do zdjęć rentgenowskich, statusu radiologicznego, protez, wycisków i czyszczenia

Pomaga zmniejszyć stres, wpływ na harmonogram i nieudane procedury z powodu odruchu wymiotnego. Nawet 8% pacjentów doświadcza odruchu wymiotnego przy każdej wizycie u dentysty, a 50% pacjentów stomatologicznych miało co najmniej jeden taki epizod.

Jedno nowe pytanie w formularzu przyjęcia pacjenta, aby zapobiec nieudanym zabiegom

"W skali od 1 do 7, gdzie 7 oznacza najgorszy wynik, jaki jest poziom niepokoju lub zakłopotania związanego z odruchem wymiotnym wpływającym na dzisiejszy zabieg?"



Co inni mówią o NoGag?

Dentysta: "Ten przypadek z pacjentką w celu ukończenia kompleksowych usług, które przywróciły jej zdrowie zębów i piękny uśmiech; nie byłoby to możliwe 1 rok temu bez NoGag w mojej praktyce. Pacjentka jest niezwykle zadowolona z rezultatu i teraz przychodzi na regularną opiekę profilaktyczną i poleca naszą praktykę. Dzięki NoGag mój zespół był w stanie pomóc tej pacjentce i zrealizować plan leczenia o wartości 9 900 USD!"

Pacjent: "Nalegałem na sedację ze względu na mój poważny problem z odruchem wymiotnym. NoGag działał cuda i pozwolił mi zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. To powinien być standard w gabinetach stomatologicznych dla pacjentów takich jak ja!"

Higienistka: "Mamy wielu pacjentów, którym mogliśmy zrobić zdjęcie rentgenowskie tylko wtedy, gdy byli na valium, użyliśmy tego i odnieśliśmy sukces za pierwszym razem. "

Higienistka: "Używaliśmy NoGag z naszymi pacjentami, którzy mieli trudności z lusterkiem w ustach. Sprawdziło się to bardzo dobrze. Nasi pacjenci są w stanie przejść przez całą procedurę bez odruchu wymiotnego".




NoGag - Droga do Twojego sukcesu

Więcej pacjentów, zabiegów i skierowań

FAQ

- **Co to jest NoGag?** Sól i kwas cytrynowy w opatentowanej proporcji. Karta MSDS jest dostępna pod adresem www.nogag.com
- **Co daje NoGag?** Eliminuje odruch wymiotny w ciągu 10 sekund i działa przez około 60 minut.
- **Jak działa NoGag?** Oddziałuje z nerwem 9 na podniebieniu miękkim, imitując pokarmu.
- **Jak sprzedawany jest NoGag?** Dostępne są opakowania proszku zawierające 20 pojedynczych porcji.
- **Czy są jakieś ograniczenia?** Brak ograniczeń wiekowych, brak alergenów, brak środka znieczulającego.
- **Gdzie jest produkowany?** Wyprodukowano w USA.
- **Jakie gwarancje są udzielane?** 60-miesięczna gwarancja trwałości. 12-miesięczna gwarancja dla klienta.
- **Jakie dane istnieją?** NoGag posiada trzy amerykańskie patenty i został przetestowany w kontrolowanym badaniu; NoGag okazał się skuteczny w 94% w porównaniu z samą solą lub samym kwasem cytrynowym.

Jak korzystać z NoGag - tak proste jak 1, 2, 3

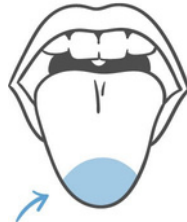

10 Seconds

- Poinformuj pacjenta, że NoGag jest całkowicie naturalny, że ma słony i pikantny smak. Do produktu nie dodano żadnych aromatów ani barwników.
- Wsyp całą zawartość opakowania na górną 1/3 przedniej części języka. Całkowita ilość proszku, jak pół ziarenka grochu (0,5 g).
- Utwórz roztwór NoGag, prosząc pacjenta o cofnięcie języka na 10 sekund.
- Połknij i ciesz się procedurą Gag Free!
- Otwórz pakiet NoGag. Można go rozerwać na końcu lub naciąć używając nożyczek.

Dystrybucja w Polsce: Ers Medical
Al. Wojska Polskiego 33; 21-400 Łuków
nogag@ersamedical.pl +48 604 969 941

Copyright© 2024 Orion Innovations Inc. | 453 S.
600 E. Street St. George, Utah 84770 | Referencje
dostępne na żądanie. | MKTN042



www.nogag.com

ersa
medical